



# cleanotix

FR Spray otique

Retirer le cérumen.

**Qu'est ce que le cérumen?** La cire d'oreille ou cérumen est une sécrétion normale produite dans l'oreille. Une accumulation excessive de cérumen peut provoquer des effets indésirables incluant une perte d'audition, une gêne, une douleur ou la toux.

**La perte d'audition** se produit lorsque le cérumen accumulé obstrue le conduit auditif, réduisant ou empêchant les ondes sonores d'atteindre la membrane du tympan.

**La gêne ou la douleur** peuvent apparaître dans les cas où le cérumen comprimé presse la membrane du tympan.

**La toux** peut se produire dans les cas où le cérumen enclavé stimule les nerfs se trouvant entre le canal auditif et la gorge, provoquant ainsi un "chatouillement dans la gorge" pouvant entraîner la toux.

**Ingredients:**

Olive oil, olivaxol® and Spearmint Oil.

**Indication:**

Dissolution et retrait de cérumen du canal externe de l'oreille.

**cleanotix** associe un dispositif de lavage mécanique accompagné d'huiles de paraffine et d'olive efficaces et sans danger. Son utilisation évite le risque de perforation grâce à sa pression équilibrée et sa diffusion parfaite. Le cérumen est dissout puis graduellement supprimé dans l'oreille après plusieurs heures ou plusieurs jours (selon la quantité) au moyen du mécanisme naturel de nettoyage de l'oreille.

**Avertissements:**

**cleanotix** ne doit pas être utilisé chez des patients souffrant d'une perforation de la membrane du tympan. **cleanotix** doit être tenu hors de portée des enfants. **cleanotix** ne doit pas être vaporisé sur les yeux. Uniquement à usage externe.

**Mode d'emploi:**

Vaporisez une pulvérisation dans chaque oreille, 3 à 5 fois par jour, jusqu'à dissolution du cérumen. Maintenez droit le canal de l'oreille en tirant légèrement vers le haut le lobe de l'oreille puis vers la nuque. Cette procédure permet une bonne pénétration des composants actifs dans les parties internes du conduit auditif.

Consultez un médecin lors de cas difficiles ou résistants au traitement. Enfants à partir de 2 ans.

**Stockage:**

Conservez Cleanotix dans un endroit frais à l'abri de la lumière.

Ne stockez pas Cleanotix dans un réfrigérateur.



Un représentant autorisé:

Obelis S.A.

53 Boulevard Général Wahis  
1030 Brussels, Belgium

Distributeur:

Reva Health Europe S.L.  
Pl. Ausiàs March 1, 4<sup>a</sup> 6<sup>a</sup>  
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA  
info@reva-health.com

Fabricant:

Naveh Pharma Ltd  
POB 8139 Natanya 42505  
Israel

**UNIQUEMENT À USAGE EXTERNE.  
SPRAY 30 ML**

# cleanotix

DE Otischer spray

Zur Entfernung von Ohrenschmalz

**Über Ohrenschmalz:** Beim Ohrenschmalz (med. Zerumen) handelt es sich um ein gewöhnliches Sekret der Ohrdrüsen. Übermäßiges Schmalz kann eine Reihe unerwünschter Resultate wie Hörverlust, Unbehagen/Schmerzen und Husten, hervorrufen.

**Hörverlust** tritt auf, wenn angehäuftes Schmalz den Ohrkanal verstopft und Schallwellen darin behindert oder davon abhält, leicht in das innere der Ohrmuschel zu gelangen.

**Unbehagen/Schmerz** ist offenkundig in Fällen, in denen verdichtetes Schmalz auf das Trommelfell drückt.

**Husten** kann auftreten, wenn zusammen gepresstes Schmalz Nerven stimuliert, die von Ohrkanal und Rachen zugleich in Anspruch genommen werden, und dadurch im Rachen ein "Kitzeln" provoziert, welches der Auslöser für Husten sein kann.

**Ingredients:**

Olive oil, olivaxol® and Spearmint Oil.

**Indikation:**

Zum Auslösen und Entfernen von Ohrenschmalz aus dem äußeren Ohrkanal.

**cleanotix** verbindet eine mechanische Waschverbindung mit der Sicherheit und Effizienz von natürlichen Paraffin- und Olivenölen. Sein Gebrauch vermeidet die Risiken einer Perforation aufgrund seines ausgeglichenen Drucks und seiner ausgezeichneten Verteilung. Das Ohrenschmalz wird aufgelöst und innerhalb einiger Stunden/Tage (in Abhängigkeit von der Menge) allmählich wieder aus dem Ohr entfernt, wobei die natürlichen Reinigungsmechanismen des

Ohres zum Tragen kommen.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

**cleanotix** nicht bei Patienten mit einem perforierten Trommelfell anwenden. Bewahren Sie das Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Nicht in das Auge sprühen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

**Gebrauchsanleitung:**

Sprühen Sie 3-5 mal täglich je einen Stoß in jedes Ohr, bis das Schmalz sich auflöst; geradewegs in den Ohrkanal, wobei Sie den Ohrlappen leicht nach oben und in Richtung Hinterkopf ziehen. Diese Vorgehensweise erlaubt ein Eindringen der aktiven Bestandteile bis in die hintersten Regionen des Ohrkanals.

In schwierigen oder unbeugsamen Fällen fragen Sie den Arzt um Mithilfe. Kinder ab 2 Jahren.

**Aufbewahrung:**

Bewahren Sie das Arzneimittel an einem kühlen, dunklen Ort (nicht im Kühlschrank) auf.



Ermächtigter Vertreter:

Obelis S.A.

53 Boulevard Général Wahis  
1030 Brussels, Belgium

Verteiler:

Reva Health Europe S.L.  
Pl. Ausiàs March 1, 4<sup>a</sup> 6<sup>a</sup>  
08195 Sant Cugat del Vallès, ESPAÑA  
info@reva-health.com

Hersteller:

Naveh Pharma Ltd  
POB 8139 Natanya 42505 · Israel

**NUR ZUR ÄUßERLICHEN ANWENDUNG.  
SPRAY 30 ML**



1 Tête droite  
Kopf gerade



2 Appuyez  
sur 1 seconde  
Drücken  
Sie 1 Sekunde



3 Tête droite  
Attendez 10 secondes  
Kopf gerade  
Warten Sie 10 Sekunden



4 Sécher  
Trocken



5 Effacer les  
10 secondes à 40 ° C  
Klar  
10 Sekunden bei 40 ° C

**RE:VA**  
Health



Issue date: 17.09.2017  
Revision No. 5.09/2017

C.N. 156367.5